


2-in-1 Therapie

- ✓ Zur Linderung von Prellungen, Schwellungen, Muskelkrämpfen, Schmerzen und Verbrennungen ersten Grades
- ✓ Ultrasoftes, flexibles Material mit 360°-Abdeckung für optimalen Sitz und hohen Tragekomfort
- ✓ Langlebig und wiederverwendbar

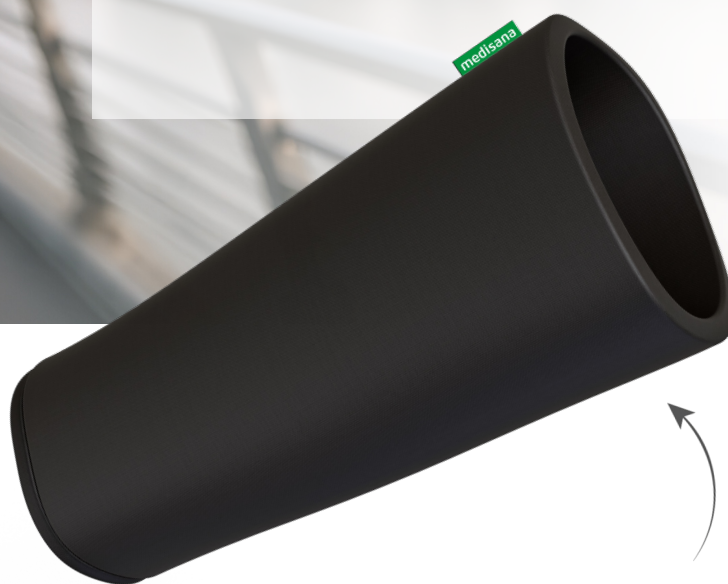

Hot & Cold Pack GP 103

Wiederverwendbare Gelkomresse

Art. Nr. 88107 | EAN 40 15588 88107 7

Gefüllt mit flexiblem,
anschmiegsamem Hydrogel

ANWENDUNGEN | FUNKTION

- Behandlungsbereich: Arm, Ellenbogen und Handgelenk
- Für Kalt- und Wärmeanwendung geeignet
- Kälteanwendung: Produkt für mindestens 2 Stunden in den Gefrierschrank oder Kühlschranks legen
- Wärmeanwendung: Produkt 35 Sekunden bei 800 W in der Mikrowelle erwärmen
- Nie länger als 15 Minuten am Stück anwenden
- Bleibt auch im gefrorenen Zustand flexibel (bis -18°C) für angenehmen Tragekomfort
- Pflegeleichtes, weiches Obermaterial
- Ungiftig
- Haltbarkeit: 5 Jahre
- Medizinprodukt (MDR Klasse I)

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 23 x 12,5 cm
- Gewicht: ca. 530 g
- Für einen Oberarmumfang von 24 bis 37 cm und einen Unterarmumfang von 20 bis 34 cm

LIEFERUMFANG

- Hot & Cold Pack
- Gebrauchsanweisung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stück | 12 x 5,5 x 14,5 cm | 0,59 kg

VPE
4 pcs | 30 x 14 x 12 cm | 2,35 kg