

## Thérapie 2-en-1

- ✓ Pour soulager les contusions, les gonflements, les crampes musculaires, les douleurs ainsi que les brûlures du premier degré
- ✓ Matériau ultra-doux et flexible avec une couverture à 360° pour un ajustement optimal et un grand confort de port
- ✓ Durable et réutilisable



## Hot & Cold Pack GP 103

### Compresse de gel réutilisable

Art. No. 88107 | EAN 40 15588 88107 7

Remplie d'un hydrogel flexible et parfaitement ajustable

#### APPLICATION | FONCTIONNALITÉS

- Zone d'application : bras, coude et poignet
- Convient pour des applications de froid et de chaleur  
Application à froid : placer le produit au congélateur ou au réfrigérateur pendant au moins 2 heures
- Application à chaud : chauffer le produit 35 secondes au micro-ondes à 800 W
- Ne jamais utiliser plus de 15 minutes d'affilée
- Reste flexible même à l'état congelé (jusqu'à -18 °C) pour un confort optimal
- Revêtement extérieur doux et facile d'entretien
- Non toxique
- Durée de conservation : 5 ans
- Dispositif médical (MDR classe I)

#### DONNÉES TECHNIQUES

- Dimensions : env. 23 × 12,5 cm
- Poids: env. 530 g
- Convient pour un tour de bras de 24 à 37 cm et un tour d'avant-bras de 20 à 34 cm

#### CONTENU DE LA BOÎTE

- Hot & Cold Pack
- Notice d'utilisation

#### LOGISTICAL DATA

Emballage de vente  
1 pièce | 12 × 5,5 × 14,5 cm | 0,59 kg  
Conditionnement (VPE)  
4 pièces | 30 × 14 × 12 cm | 2,35 kg