



## 2-in-1 Therapie

- ✓ Zur Linderung von Prellungen, Schwellungen, Muskelkrämpfen, Schmerzen und Verbrennungen ersten Grades
- ✓ Ultrasoftes, flexibles Material mit 360°-Abdeckung für optimalen Sitz und hohen Tragekomfort
- ✓ Langlebig und wiederverwendbar



## Hot & Cold Pack GP 105 Wiederverwendbare Gelkomresse

Art. Nr. 88105 | EAN 40 15588 88105 3

Gefüllt mit flexiblem,  
anschmiegsamem Hydrogel

### ANWENDUNGEN | FUNKTION

- Behandlungsbereich: Bein, Knie
- Für Kalt- und Wärmeanwendung geeignet
- Kälteanwendung: Produkt für mindestens 2 Stunden in den Gefrierschrank oder Kühlschranks legen
- Wärmeanwendung: Produkt 45 Sekunden bei 800 W in der Mikrowelle erwärmen
- Nie länger als 15 Minuten am Stück anwenden
- Bleibt auch im gefrorenen Zustand flexibel (bis  $-18^{\circ}\text{C}$ ) für angenehmen Tragekomfort
- Pflegeleichtes, weiches Obermaterial
- Ungiftig
- Haltbarkeit: 5 Jahre
- Medizinprodukt (MDR Klasse I)

### TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 24,5 x 15 cm
- Gewicht: ca. 820 g
- Für einen Oberschenkelumfang von 34 bis 56 cm und einen Wadenumfang von 29 bis 42 cm

### LIEFERUMFANG

- Hot & Cold Pack
- Gebrauchsanweisung

### LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung  
1 Stück | 12 x 7 x 18,5 cm | 0,9 kg

VPE  
4 Stück | 38 x 30,5 x 8 cm | 3,59 kg

03DEC2025